

QUALITY
LIFE
LEADERS

クオリティライフリーダーズ

この街に、AEDと使う勇気を広めてゆく。



ある日、突然だれにでも起こりうる心臓突然死。日本での病院以外での心臓突然死は年間7万人とも言われています。原因のほとんどが心臓のけいれんにより全身に血液を送るポンプとしての役割を果たせない状態「心室細動」と呼ばれるものです。この「心室細動」の唯一の治療方法が、除細動器(AED含む)で電気ショックを与えることだと言われています。経験のない方でも、適切な操作が出来るよう設計されているAEDがあれば、救える命はもっと多くなります。3分以内に除細動を行なうことが高救命率への鍵。そのためにはAEDの最適配置が必要です。

オートボリューム(自動音量調整機能)

まわりの騒音にあわせ音声ガイダンスの音量が大きくなる

モード切替[成人⇄小児](セーフティガード付)

成人用モード(小学生以上)と小児用モードに切替可能

3つのステータスインジケータ

①バッテリー残量表示 ②電極パッド期限表示 ③エラー状態表示

CPRコーチング

的確なリズムと音声ガイダンスでサポート



医療機器承認番号 /2200BZX00338000
高度管理医療機器、特定管理医療機器



長寿命バッテリー搭載





小型・軽量で持ち運びが容易



電気ショックの必要性は AED が判断

使用方法

①モード選択・電源ON

成人・小児モードを切り替え
電源ボタンを押してください。



②衣服を脱がせる

上半身の衣服を脱がせ
胸をはだけけます。



③電極パッドを貼る

機器の底面にある電極パッドの袋を取り出し、
袋を破いて電極パッドを取り出してください。
示している図を確認してシートからはがし、
図のように貼ってください。




④心電図解析中

身体から離れてください。



⑤電気ショック

指示が出ましたらオレンジ色で点滅する
ショックボタンを押してください。

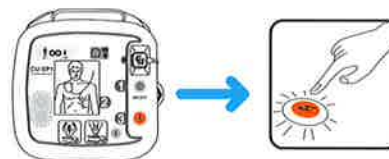

⑥CPR(心肺蘇生)

直ちに胸骨圧迫を行ってください。
出来るなら人工呼吸も行ってください。



仕様

販売名	シーユーSP1
電極	両用電極パッド(成人・小児、兼用 1回限りの使い捨て)
出力エネルギー	定格 150J(成人)・負荷50Ωで公称150J、小児:負荷50Ωで公称50J)
波形	二相性波形(e-cubu Biphasic)波形パラメータは、傷病者の胸部インピーダンスの負荷に応じて自動調整
バッテリー	DC12V、4.2A 長寿命使い捨てバッテリー(ディスポーザブルLiMuO ₂ バッテリー)
バッテリー容量	スタンバイ状態5年以上、電気ショック200回以上
セルフテスト	毎日、毎週、4週毎、バッテリー装着時(バッテリー残量、電極パッド、内部回路、等)
寸法・質量	260×256×69,5(W×L×Hmm)2,4kg(バッテリー含む)
メモリ機能	5件のデータ保存が可能(1件、3時間、最大15時間のイベント情報・ECG情報)PC転送(SDカード、赤外線通信)
ガイド機能	3つのインジケータ(フラッシュライト機能付きイラスト表示)と、CPRコーティング機能
モード切替	成人・小児モード切替スイッチ(セーフティガード付)
ステータスインジケータ	3つのステータス確認ができるLCD画面【電極パッド期限、バッテリー残量、機器のエラー状態】
IP:55(IEC60529)	粉塵が内部に侵入することを防止、いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない



日常点検を忘れずに!

AEDは救命処置のための医療機器です。
AEDを設置したら、いつでも使用できるように、
AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

AEDコールセンター ☎ 0120-910-256

製造元

株式会社CUメディカルシステムズ
http://www.cu911.com

製造販売業者
株式会社CU

販売元

クオリティライフリーダーズ(中越クリーンサービス株式会社)
〒950-0073 新潟市中央区日の出三丁目4番15号
TEL 025(244)3131 FAX025(244)1431
E-mail t-maki@chuetsu-cs.co.jp http://www.chuetsu-cs.co.jp/

構成

SP1-SP



AED本体



大容量
バッテリーパック



両用電極パッド
成人・小児、兼用



SDカード



SDカード
リーダー

消耗品



両用電極パッド
成人・小児、兼用
SP1-0A04



小児用電極パッド
小児専用
SP1-0A05



大容量
バッテリーパック
SPA-0A03

オプション



キャリングケース
SP1-0A01

収納 ケース



スタンダードBOXタイプ
ER1-SK-SD



壁掛け収納ケース
ER1-SK-DM4



卓上型収納ケース
ER1-SK-DM5



壁掛けTブラケット

※取扱説明書及び注意書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ※仕様、外観等の一部が都合により変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※AEDの設置管理者は、AEDに不測の事態発生した時及び譲渡時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る)、廃棄時には、連絡してください。
※添付文書を必ずお読みください。 ※電極パッドは1回限りの使い捨てです。